

LIGNES DIRECTRICES - (COVID-19) DÉSINFECTION DES PRODUITS ROGER DANS LES SALLES DE CLASSE



P-E-C

Recommandations pour la désinfection des produits Roger dans les salles de classe

Introduction

Ce document contient des recommandations pour la désinfection des produits Roger dans le contexte spécifique du Covid-19. Ces recommandations doivent être appliquées dans les salles de classe où les produits Roger sont partagés entre les utilisateurs.

Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se propage principalement par projection de gouttelettes générées lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, ou par des gouttelettes de salive ou de sécrétions nasales.

(source: <https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus>)

Le partage de produits portables ou portés sur le corps, comme les micros Roger, entre plusieurs utilisateurs peut créer un risque de transfert de particules virales d'un utilisateur à l'autre. Même des personnes apparemment en bonne santé pourraient avoir une infection au coronavirus non reconnu, il est donc fortement recommandé de procéder à une étape de désinfection lors du changement d'utilisateur.

Champ d'application

Cette recommandation s'applique aux produits Roger suivants lorsqu'ils sont partagés entre utilisateurs afin de réduire le risque de transmission du coronavirus :

- Roger Touchscreen Mic (micro-cravate)
- Roger Pass-arounds (micro à main)
- Roger Multimedia Hub (diffuseur multimédia)



Choix du désinfectant

Il convient d'utiliser un désinfectant de surface qui est efficace contre les virus enveloppés (tel que le nouveau virus corona). N'utilisez pas un désinfectant contenant des émoullients cutanés, que l'on retrouve souvent dans les désinfectants pour les mains.

L'eau de Javel (contenant par exemple du chlore ou du peroxyde) et les désinfectants contenant de l'éthanol ne doivent généralement pas être utilisés car ils peuvent endommager les matériaux.

Les désinfectants suivants sont généralement recommandés :

- Solutions désinfectantes à base d'eau (de préférence)
- Une solution contenant 70 % d'isopropanol

Règles importantes pour l'étape de nettoyage :

- Le désinfectant doit être utilisé conformément aux spécifications du fournisseur, telles que le temps de contact, le frottement à sec après l'application du désinfectant, le temps de séchage et autres le cas échéant.
- Essuyez l'appareil avec une serviette jetable imbibée de désinfectant.
- Jeter les serviettes dans une bac à déchets avec couvercle ou dans un sac en plastique.
- Ne jamais vaporiser directement le désinfectant sur l'appareil, ne jamais immerger l'appareil dans le désinfectant.
- Veillez à ce que les ouvertures, en particulier celles des microphones, ne soient jamais en contact avec un liquide, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- Tout en nettoyant l'appareil avec du désinfectant, n'appuyez sur aucun bouton et ce, tant que l'appareil est encore humide.

Clause de non-responsabilité

Sonova publie ces recommandations pour guider ses clients et les utilisateurs de ses produits. Sonova ne sera pas tenu responsable de tout dommage en raison de la mise en oeuvre des recommandations ci-dessus. Les désinfectants à base d'alcool peuvent potentiellement causer des dommages sur les revêtements ou les composants sensibles de l'appareil.

